



- Ez3D-i ofrece dos tipos de visores simples. Los usuarios deben elegir uno según las especificaciones del sistema de su PC.
- Esta documentación de ayuda proporciona una guía para seleccionar un visor. Se recomienda a los usuarios leer este documento para seleccionar el visor que mejor se adapte a su PC.
- El propósito de este documento es enseñar a los usuarios a elegir el visor correcto. Por lo tanto, no incluye instrucciones sobre cómo usarlo los visores.

1. iniciador del visor simple


1) Inserte el dispositivo de almacenamiento que contiene el iniciador del visor simple en su PC, o en su caso descargue los archivos mediante link WeTransfer proporcionado por el laboratorio Radiológico.



2) Si el iniciador del visor simple no se ejecuta automáticamente, abra la unidad que lo contiene desde el Explorador de archivos y ejecútelo manualmente.
(SimpleViewerLauncher.exe)

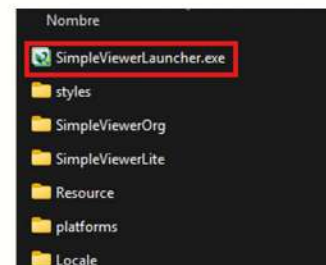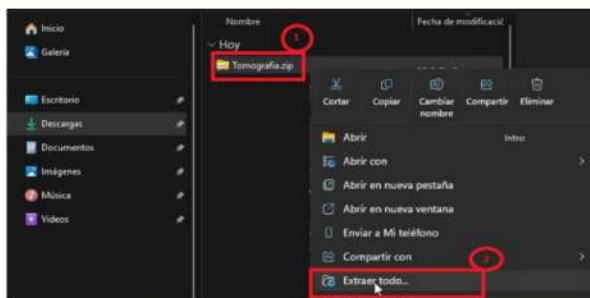

3) Si la Pantalla inteligente de Windows Defender está activada, es posible que aparezca una ventana de advertencia de seguridad. Seleccione "Información adicional" y haga clic en "Ejecutar".

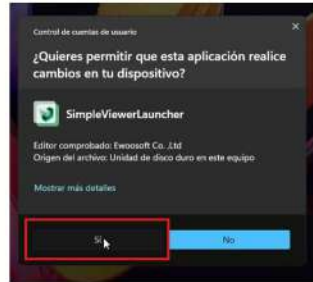

4) Hay dos tipos de visores simples. Consulte los requisitos del sistema de cada Simple Viewer en la sección 2.



2. Especificaciones mínimas del sistema para ejecutar Simple Viewer

► Cómo comprobar la instalación de una tarjeta gráfica externa

- Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows y compruebe si el menú contextual contiene "Panel de control de NVIDIA" o "Catalyst Control Center".

- Si alguno de los dos está disponible, el PC tiene una tarjeta gráfica dedicada.

1) Especificaciones del sistema de Simple Viewers

i . **Simple Viewer Original** Simple Viewer (Requiere una tarjeta gráfica dedicada)

- * Microsoft Windows 7, solo de 64 bits o superior
- * Procesador: Intel® Core™ 2 DUO o superior
- * RAM: 4 GB mínimo
- * Disco duro: 20 GB mínimo
- * NVIDIA GeForce GT 720 o superior
- * Memoria de la GPU: 1 GB o superior
- * OpenGL 2.1 o superior

ii . **Simple Viewer Lite** Simple Viewer Lite (No requiere tarjeta gráfica dedicada)

- * Microsoft Windows XP (SP1), Vista de 32 bits
- * Procesador: Core DUO CPU de 1,9 GHz o superior
- * RAM: 2 GB o superior
- * Disco duro: 2 GB de espacio libre
- * Tarjeta de red Ethernet
- * Pantalla: 1280 * 1024 * 32 bpp

2) Características de cada Simple Viewer

i . **Simple Viewer Original** Simple Viewer

- * El trabajo realizado antes de exportar la imagen desde Ez3D-i se mostrará junto con una representación volumétrica de alta resolución de la imagen exportada.

- * El trabajo realizado en Simple Viewer Original se puede guardar para futuras consultas.
- * Los usuarios tienen acceso a las últimas funciones de Ez3D-i.


ii . Simple Viewer Lite

Simple Viewer Lite

- * El trabajo realizado antes de exportar la imagen desde Ez3D-i no se puede visualizar con Simple Viewer Lite.
- * El trabajo realizado en Simple Viewer Lite no se puede guardar para futuras consultas. * Los usuarios tienen acceso a las funciones de Simple Viewer Lite.

3. Guía rápida de solución de problemas

1) Caso 1

- Tengo una tarjeta gráfica dedicada, pero no puedo abrir una imagen de tomografía computarizada con Simple Viewer Original .

*** Solución**

- i . Abra el Panel de control de NVIDIA.
- ii . En la parte izquierda de la ventana del Panel de control, haga clic en "Administrar configuración 3D".
- iii . Vaya a la pestaña "Configuración del programa".
- iv . Haga clic en "Agregar", pulse "Buscar" y seleccione el archivo ejecutable que se muestra a continuación.

"C:\Temp\E3\Bin\Ez3D-i64.exe"

v . Cambie "Usar configuración global" a "Procesador NVIDIA de alto rendimiento".

vi. Haga clic en "Aplicar" antes de cerrar el Panel de control de NVIDIA y reinicie Simple Viewer Original.

2) Caso 2

- En Windows 10, no puedo ejecutar Simple Viewer Lite

Simple Viewer Lite

*** Solución**

: Dado que Windows 10 no es compatible con .NET Framework 3.5 por defecto, la ventana para comprobar la instalación de .NET Framework 3.5 debería aparecer al intentar instalar y ejecutar Simple Viewer Lite. (En esta ventana, debe seleccionar la opción "Omitir esta instalación" dos veces seguidas). Sin embargo, puede ocurrir que esta ventana emergente no se muestre y no se puedan ejecutar los pasos necesarios para ejecutar el programa. Para que el programa se ejecute automáticamente sin la ventana emergente, siga estos pasos:

- i . Abra el Panel de control de Windows.
- ii . Vaya a "Programas y características".
- iii. Vaya a "Activar o desactivar las características de Windows".
- iv. Seleccione la casilla ".NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0)".
- v . Reinicie el PC si es necesario.